

VLabs 3DX

- Canine Parvovirus Antigen
- Canine Coronavirus Antigen
- Giardia Antigen

Combo Test



Bioguard VLabs 3DX Canine Parvovirus (CPV) Ag/ Canine Coronavirus (CCV) Ag / Giardia Ag Combo Test je laterální průtokový imunochromatografický test v sendvičovém uspořádání vyvinutý a vyráběný společností Bioguard Corporation pro rychlou a kvalitativní detekci psího parvoviru, psího koronaviru a giardií ve výkalech psů. Testovací zařízení má tři testovací okénka, každé obsahuje T (testovací zónu) a C (kontrolní zónu). Po aplikaci vzorku do jamky je vzorek unášen po povrchu testovacího proužku. Pokud je ve vzorku detektovatelné množství CPV Ag/CCV Ag/Giardia Ag, objeví se viditelný proužek T. Po nanesení vzorku by se měl vždy objevit proužek C, což znamená platný výsledek. Tímto způsobem může test přesně indikovat přítomnost CPV Ag/CCV Ag/Giardia Ag.

OBSAH SETU


položka	balení			
	1 test	2 testy	5 testů	10 testů
VLabs 3DX test	1	2	5	10
jednorázové kapátko	1	2	5	10
lahvička s pufrem	1	2	5	10
sterilní tampon	1	2	5	10
návod	1	1	1	1

VZOREK


Trus.

POSTUP

- Vyjměte z krabičky zapečetěný sáček, zkumavku na testování a zkumavku na odběr krve EDTA.
- Vyjměte kazetu z fóliového sáčku a položte ji vodorovně na čistý povrch.
- Sbírejte výkaly psa pomocí tamponu tak, aby se tampon dobře vsákl do výkalů.
Odeberte vzorek trusu pomocí tamponu tak, aby byl horní konec tamponu dobře pokrytý. Nadměrné množství výkalů může vyvolat falešně pozitivní výsledek a zpomalit migraci.
- Odšroubujte uzávěr dodané zkumavky s testovacím pufrem. Vložte do zkumavky tampon se vzorkem a promíchejte jej. Zkumavku uzavřete a protřepte, abyste se ujistili, že se vzorek dobře rozpustil v pufru.
- Postupně nakapejte 4 kapky (100 µl) extraktu vzorku do jamky pro vzorek pomocí jednorázového kapátka (v případě upínání odstraňte sediment).
- Výsledek interpretujte za 5 až 10 minut. Výsledek po 10 minutách se nesmí odcítat.

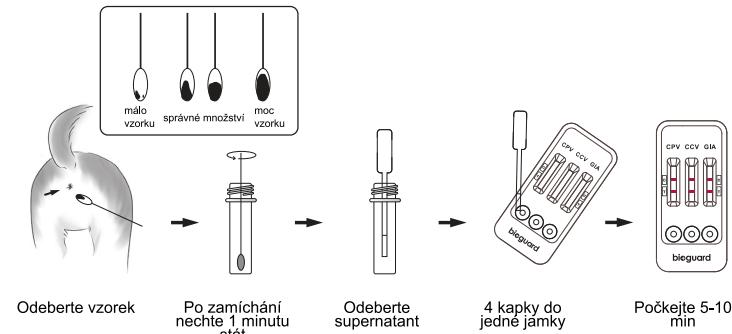

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

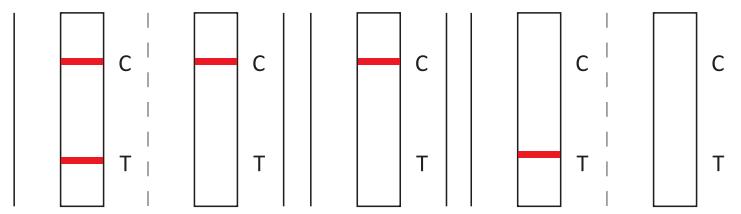Pozitivní: přítomnost proužku C a T. T proužek může být méně výrazný.**Negativní:** přítomnost pouze proužku C.**Chybny:** chybí proužek C, bez ohledu na přítomnost T proužku.

Pozitivní

Negativní

Chybny výsledek

SKLADOVÁNÍ

- Soupravy skladujte při teplotě 2-30 °C. NEMRAZIT. Pokud jsou skladovány v chladu, udržujte je před použitím 15~30 minut při pokojové teplotě.
- Testovací soupravu neskladujte na přímém slunečním světle.
- Testovací soupravy jsou stabilní do data expirace (24 měsíců) vyznačeného na fóliovém sáčku.

PODMÍNKY POUŽITÍ

- Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, důsledně dodržujte tyto pokyny.
- Před použitím věnujte pozornost datu spotřeby vyznačenému na fóliovém sáčku. Nepoužívejte soupravy s prošlou dobou použitelnosti.
- Nevyjímejte soupravu z fóliového sáčku, dokud není test připraven k provedení, aby souprava nebyla nadměrně vystavena vzduchu a ovlivněna vlhkostí. Veškerá manipulace by měla být ukončena do 10 minut po otevření fóliového sáčku.
- Všechna testovací zařízení v krabici, včetně testovací soupravy, kapátka a testovacího pufu a zkumavky EDTA, jsou na jedno použití. Nepoužívejte je opakovaně. Po ukončení testu všechny vzorky a soupravy rádně zlikvidujte v souladu se správnou laboratorní praxí (SLP).
- V případě výskytu abnormálních jevů na testovacích proužcích nehybejte s testovacími proužky po aplikaci vzorků do jamek pro vzorky.
- Součástí této soupravy byly kontrolovány z hlediska kvality jako standardní šarže. Nemíchejte komponenty z různých jednotek s různými čísly šarží.

OMEZENÍ

Test je určen pouze pro veterinární použití a diagnostiku in vitro a **není schopen vyloučit všechny možnosti falešně negativních a falešně pozitivních výsledků způsobených různými faktory**. Proto by veterinární lékaři měli kromě výsledků z testovacích souprav zvážit i další klinické informace a laboratorní diagnostické metody, aby mohli v praxi stanovit definitivní diagnózu.